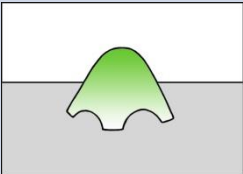
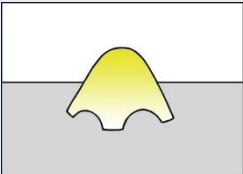
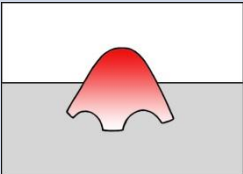
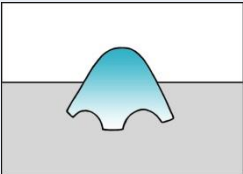
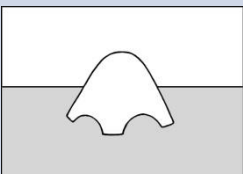



| Farbe | Beschreibung der Farbbotschaft |
|---|--|
|  | <p>Alles ist wie immer. Es gibt keine Abweichung von der täglichen Routine.</p> |
|  | <p>Alles ist weiterhin normal. Man sollte aber ein Auge darauf haben, ob sich die Farbe in den nächsten Stunden in Richtung rot verfärbt.</p> |
|  | <p>Etwas ist anders als sonst. Es gibt eine Abweichung von der täglichen Routine. Ein Grund für zu wenig Aktivität könnte sein, dass die Person sich nicht mehr bewegt. Ein Grund für sehr starke Aktivität könnte sein, dass die Person sehr unruhig ist oder Besuch bekommen hat.</p> |
|  | <p>Das System hat momentan eine gestörte Funkverbindung . Warten Sie einen Tag, da in dieser Zeit das System versuchen wird die Verbindung wieder herzustellen. Überprüfen Sie ob das Gerät eingeschaltet ist, die Antenne einen Meter entfernt und <u>aufrecht</u> positioniert ist. Fragen Sie uns nach Unterstützung - info@iocare.de - 0711 31534475.</p> |
|  | <p>1) Das System ist zu Beginn 3 Wochen in seiner Lernphase. Nach dieser Lernphase wird das System automatisch in seine aktive Anzeigephase übergehen. 2) Die Wohnung wurde mit dem Schlüsselanhänger für mehr als 24 Stunden verlassen.  Ist dies nicht der Fall befindet sich der Schlüsselanhänger zu weit von der Basisstation entfernt oder die Batterie ist leer und muss erneuert werden. Die Laufzeit der Batterie beträgt ca. ½ - 1 Jahr.</p> |